

## ПАЛИЦЯ РЕГУЛЬОВАНА Арт. RM920L



## ПАЛИЦЯ РЕГУЛЬОВАНА ЧОТИРИНОГА / Арт. RM924



### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр	Значення	
	Модель:	RM920L
Матеріал каркасу:	алюміній	алюміній, сталь
Матеріал ручки:	пластик	
Матеріал накінецьника:	гума	
Регульована висота (Min-Max):	83 – 98 см	76 – 101 см
Габаритні розміри у складеному вигляді:	13/65/4 см	22/76/16 см
Вага:	0,39 кг	0,82 кг
Максим.навантаження / Вага користувача у Min-Max положенні висоти:	< 75-50 кг / < 120-100 кг	
* Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкції виробів без додаткових повідомлень споживачів		



**Виробник: ПП «РЕМЕД», Україна,  
м. Дніпро, вул. Енеїди 53-А тел. +380673522555,  
e-mail: info@remed.ua, REMED.UA**  
Виріб медичного застосування Клас I потенційного ризику згідно ТУ У 30.92/32.50.22-37363941-001:2022



## ПАЛИЦЯ РЕГУЛЬОВАНА Арт. RM920L

## ПАЛИЦЯ РЕГУЛЬОВАНА ЧОТИРИНОГА / Арт. RM924

### ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ КЛАС І ПОТЕНЦІЙНОГО РИЗИКУ

ДЯКУЄМО, ЩО НАДАЛИ ПЕРЕВАГУ ПРОДУКЦІЇ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТМ REMED ТА ПРИДБАЛИ ЗАСІБ RM920L / RM924.

#### МЕДИЧНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ:

Для полегшення пересування літніх людей і людей із порушеннями опорно-рухового апарату в період лікування або реабілітації після операцій, хвороб, травм - як додаткова опора при ходьбі та інших рухах та як засіб для самостійного пересування та транспортування інвалідів і людей з обмеженими можливостями в побуті.

#### РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ:

Палиці регульовані (\*далі по тексту «виріб/вироби») рекомендовано для застосування у медичних закладах або в побуті. Вироби призначені для застосування користувачем самостійно або за призначенням лікаря. Виріб підходить для будь-якого віку дорослої людини. Індивідуальний підбір висоти палиці виконується шляхом переставлення фіксатору опорної стійки у потрібне положення. Вироби призначені для використання при температурі від -20°C до +30°C та відносній вологості повітря до 80%. Зберігати вироби у сухому закритому приміщенні при температурі від -5°C до +30°C та відносній вологості повітря до 65% на відстані від нагривальних приладів та прямих сонячних променів.

#### ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД:

Перевіряйте належний стан виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. Не використовуйте виріб у разі поломки або несправності, пошкодження або розривів вузлів або деталей конструкції. Завжди тримайте виріб та всі елементи його конструкції в чистоті для використання протягом тривалого терміну. Металевий каркас очищуйте за допомогою мінімальної кількості води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання. У разі необхідності зовнішню поверхню виробу рекомендовано обробляти дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.



**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу. Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією. Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження. Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

#### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

1. Переконайтеся, що виріб готовий до експлуатації та не потребує будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
  2. Завжди перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. Переконайтеся, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. Не використовуйте виріб у випадку його зносу або пошкодження.
  3. Слідкуйте за станом зносу та вчасно замініть накінечники! \*Накінечники є витратним змінним елементом конструкції виробу.
- ТМ REMED додатково пропонує витратні матеріали до засобів реабілітації у фірмовому інтернет-магазині **RE-MED.UA**
4. Будьте обачні на нерівних поверхнях. Не використовуйте виріб на хитких та нестійких поверхнях.
  5. Ніколи не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
  6. У випадку використання виробу різними пацієнтами рекомендується систематично і ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути інфекцій.



**Виробник:** ПП «РЕМЕД», Україна, м. Дніпро, вул. Енеїди 53-А  
тел. +380673522555, e-mail: info@remed.ua, **REMED.UA**

Дата виробництва та Код партії – дивись маркування на виробі.

Термін зберігання при дотриманні умов: необмежений.

Гарантований строк експлуатації при дотриманні умов: 12 місяців

Кількість виробів в комплекті: 1 шт. Виріб медичного застосування Клас I потенційного ризику. Згідно ТУ У 30.92/32.50.22-37363941-001:2022



Інструкцію з медичного використання та іншу додаткову інформацію дивіться на звороті.





**ПАЛИЦЯ  
РЕГУЛЬОВАНА  
Арт. RM920L**



**ПАЛИЦЯ  
РЕГУЛЬОВАНА  
ЧОТИРИНОГА  
Арт. RM924**

**ОПИС ВИРОБУ:**

1. Конструкція виробу легка, складна, регульована, виготовлена з металу з використанням технології порошкового фарбування.
2. Ручка виготовлена з міцного пластику ергономічної форми для зручного використання.
3. Виріб оснащений гумовими протиковзкими накінецьниками.
4. Передбачена можливість легкого регулювання висоти за допомогою перестановки фіксатора.

**ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ:**

**Регулювання висоти:**

1. Перед початком експлуатації виробу установіть необхідну для користувача висоту палиці. Регулювання висоти виробу здійснюється за допомогою перестановки фіксатора на опори - див.Схему 1.
2. Вийміть фіксатор, відрегулюйте необхідну довжину палиці легкими рухами та поворотами внутрішньої трубки, знайдіть та сумістіть відповідний отвір з зовнішньою трубкою. Вставте фіксатор до упору.
3. Перевірте робочий стан виробу та його надійність.



**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ\* ВИРОБІВ RM920L/RM924 :**

Схема 1

Параметр	Значення	
Модель:	RM920L	RM924
Розмір:	універсальний (для дорослої людини)	
Матеріал каркасу:	алюміній	алюміній, сталь
Матеріал ручки / Матеріал накінецьника:	пластик / гума	
Регульована висота (Min-Max):	83 – 98 см	76 – 101 см
Габаритні розміри у складеному вигляді:	13/65/4 см	22/76/16 см
Вага:	0,39 кг	0,82 кг
Максим.навантаження у <u>Max-Min</u> положенні висоти:	< 50-75 кг	
Максим. вага користувача у <u>Max-Min</u> положенні висоти:	< 100-120 кг	

\* Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкції виробів без додаткових повідомлень споживачів

**ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА:**

Виробник гарантує використання високоякісних матеріалів і контроль якості виробництва та готової продукції згідно зі стандартом ISO 13485:2016. Виріб розроблено у відповідності з умовами максимальної зручності та безпеки для користувача. Даний виріб відповідає вимогам Європейського Регламенту щодо медичних пристроїв (ЕС) 2017/745 (MDR). Гарантійний термін на виріб 12 місяців з дати продажу за умов дотримання правил експлуатації виробу, зазначених в Інструкції. Якщо дата продажу не підтверджена платіжним документом гарантійний термін обчислюється з дати виробництва, що вказана на маркуванні виробу. Виробник не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був самостійно змінений або замінений на неоригінальний. Претензії по гарантії втрачають силу у випадках: закінчення гарантійного терміну, недбалості чи неправильної експлуатації або використання виробу не за своїм цільовим призначенням.

**УМОВИ ГАРАНТІЇ:**

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну. У разі настання гарантійного випадку слід звернутись у місце продажу виробу.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - 2.1. порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - 2.2. наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
  - 2.3. якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
  - 3.1. механічні пошкодження чи пошкодження будь-яких елементів виробу внаслідок транспортування;
  - 3.2. пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - 3.3. пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями.
4. Споживач має право на обмін нового товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів».
5. Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.