


REMED®

*Комфорт і здоров'я
для Вашого життя!*

NEW!

**НОВА ПРОДУКЦІЯ
ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ**

МИЛИЦЯ РЕГУЛЬОВАНА Арт. RM937L

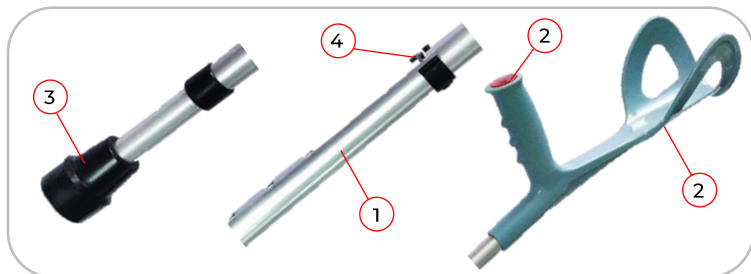

ОПИС ВИРОБУ:

1. Конструкція виробу легка, складна, регульована, виготовлена з металу із використанням технології порошкового фарбування.
2. Ручка виготовлена з міцного пластику ергономічної форми з додатковою підлоктною підтримкою для зручного використання. На ручці розташований світловідбивач.
3. Виріб оснащений гумовим протиковзким накінецьником.
4. Передбачена можливість легкого регулювання висоти милиці за допомогою перестановки фіксатора.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ* ВИРОБУ REMED RM937L:

Параметр	Значення
Розмір:	універсальний (для дорослої людини)
Матеріал каркасу:	алюміній
Матеріал / Тип ручки:	пластик / з опорою на передпліччя
Матеріал накінецьника:	гума
Регульована (загальна) висота виробу (Min-Max):	96 – 119 см
Вага:	0,47 кг
Максим.навантаження у <u>Min-Max</u> положенні висоти:	< 130-50 кг

* Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкції виробів без додаткових повідомлень споживачів

**Виробник: ПП «РЕМЕД», Україна,
м. Дніпро, вул. Енеїди 53-А тел. +380673522555,
e-mail: info@remed.ua, REMED.UA
Виріб медичного застосування Клас I потенційного
ризику згідно ТУ У 30.92/32.50.22-37363941-001:2022**



МИЛИЦЯ РЕГУЛЬОВАНА

Арт. RM937L

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ КЛАС I ПОТЕНЦІЙНОГО РИЗИКУ

ДЯКУЄМО, ЩО НАДАЛИ ПЕРЕВАГУ ПРОДУКЦІЇ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТМ REMED ТА ПРИДБАЛИ ЗАСІБ RM937L.

МЕДИЧНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ: Для полегшення пересування літніх людей і людей із порушеннями опорно-рухового апарату в період лікування або реабілітації після операцій, хвороб, травм - як додаткова опора при ходьбі та інших рухах та як засіб для самостійного пересування та транспортування інвалідів і людей з обмеженими можливостями в побуті.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ: Милиця регульовані (*далі по тексті «виріб/вироби») рекомендовано для застосування у медичних закладах або в побуті. Вироби призначені для застосування користувачем самостійно або за призначенням лікаря. Виріб підходить для будь-якого віку дорослої людини. Індивідуальний підбір висоти милиці виконується шляхом переставлення фіксатору опорної стійки у потрібне положення. Вироби призначені для використання при температурі від -20°C до +30°C та відносній вологості повітря до 80%. Зберігати вироби у сухому закритому приміщенні при температурі від -5°C до +30°C та відносній вологості повітря до 65% на відстані від нагривальних приладів та прямих сонячних променів.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу. Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією. Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження. Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

1. Переконайтеся, що виріб готовий до експлуатації та не потребує будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
 2. Завжди перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. Переконайтеся, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. Не використовуйте виріб у випадку його зносу або пошкодження.
 3. Слідкуйте за станом зносу та вчасно замініть накіненчики! *Накіненчики є витратним змінним елементом конструкції виробу.
- ТМ REMED додатково пропонує витратні матеріали до засобів реабілітації у фірмовому інтернет-магазині **RE-MED.UA**
4. Будьте обачні на нерівних поверхнях. Не використовуйте виріб на хитких та нестійких поверхнях.
 5. Ніколи не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
 6. У випадку використання виробу різними пацієнтами рекомендується систематично і ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути інфекцій.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД:

Перевіряйте належний стан виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. Не використовуйте виріб у разі поломки або несправності, пошкодженнь або розривів вузлів або деталей конструкції. Завжди тримайте виріб та всі елементи його конструкції в чистоті для використання протягом тривалого терміну. Металевий каркас очищуйте за допомогою мінімальної кількості води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання. У разі необхідності зовнішню поверхню виробу рекомендовано обробляти дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволенними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.



Виробник: ПП «РЕМЕД», Україна, м. Дніпро, вул. Енеїди 53-А
тел. +380673522555, e-mail: info@remed.ua, **REMED.UA**

Дата виробництва та Код партії – дивись маркування на виробі.

Термін зберігання при дотриманні умов: необмежений.

Гарантований строк експлуатації при дотриманні умов: 12 місяців

Кількість виробів в комплекті: 1 шт.

Виріб медичного застосування Клас I потенційного ризику

Згідно ТУ У 30.92/32.50.22-37363941-001:2022

Інструкцію з медичного використання та іншу додаткову інформацію дивіться на звороті.



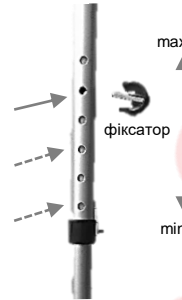


Схема 1

ОПИС ВИРОБУ:

1. Конструкція виробу легка, складна, регульована, виготовлена з металу із використанням технології порошкового фарбування.
2. Ручка виготовлена з міцного пластику ергономічної форми з додатковою підлокітною підтримкою для зручного використання. На ручці розташований світловідбивач.
3. Виріб оснащений гумовим протиковзким накінецьником.
4. Передбачена можливість легкого регулювання висоти милиці за допомогою перестановки фіксатора.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ:

Регулювання висоти:

1. Перед початком експлуатації виробу установіть необхідну для користувача висоту палиці. Регулювання висоти виробу здійснюється за допомогою перестановки фіксатора на опорі - див.Схему 1.
2. Вийміть фіксатор, відрегулюйте необхідну довжину палиці легкими рухами та поворотами внутрішньої трубки, знайдіть та сумістіть відповідний отвір з зовнішньою трубкою. Вставте фіксатор до упору.
3. Перевірте робочий стан виробу та його надійність.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ* ВИРОБУ REMED RM937L:

Параметр	Значення
Модель:	Милиця регульована RM937L
Розмір:	універсальний (для дорослої людини)
Матеріал каркасу:	алюміній
Матеріал / Тип ручки:	пластик / з опорою на передпліччя
Матеріал накінецьника:	гума
Регульована (загальна) висота виробу (Min-Max):	96 – 119 см
Вага:	0,47 кг
Максим.навантаження у Min-Max положенні висоти:	< 130-50 кг

* Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкції виробів без додаткових повідомлень споживачів

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА:

Виробник гарантує використання високоякісних матеріалів і контроль якості виробництва та готової продукції згідно зі стандартом ISO 13485:2016. Виріб розроблено у відповідності з умовами максимальної зручності та безпеки для користувача. Даний виріб відповідає вимогам Європейського Регламенту щодо медичних пристроїв (ЄС) 2017/745 (MDR). Гарантійний термін на виріб 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених в Інструкції. Якщо дата продажу не підтверджена платіжним документом гарантійний термін обчислюється з дати виробництва, що вказана на маркуванні виробу. Виробник не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був самостійно змінений або замінений на неоригінальний. Претензії по гарантії втрачають силу у випадках: закінчення гарантійного терміну, недбалості чи неправильної експлуатації або використання виробу не за своїм цільовим призначенням.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну. У разі настання гарантійного випадку слід звернутись у місце продажу виробу.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - 2.1. порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - 2.2. наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - 2.3. якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - 3.1. механічні пошкодження чи пошкодження будь-яких елементів виробу внаслідок транспортування;
 - 3.2. пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - 3.3. пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями.
4. Споживач має право на обмін нового товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів».
5. Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.